


レメイ アオルティック・ オクルージョン・カテーテル

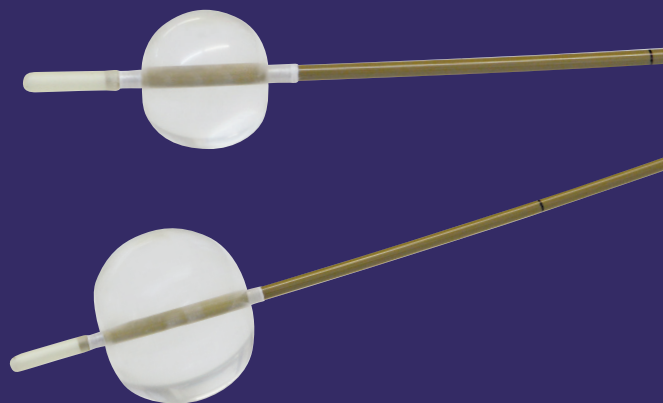

レメイのオクルージョン・カテーテル製品群に新しい製品が加わりました。
シャフト径8F/長さ80cmのレメイ アオルティック・オクルージョン・カテーテルです。
大動脈または総腸骨動脈の一時的な血流遮断に使用できます。
シャフトには10cm毎に深度マーカーを配置しております。

ORDERING INFORMATION

	バルーン直径	シャフト	色	有効長	製品番号	JANコード
レメイ アオルティック・オクルージョン・カテーテル						
	28 mm	8F	■	80 cm	2107-80	4571191913142
	45 mm	8F	■	80 cm	2107-81	4571191913159

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください。

【警告】

- ・本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し適切な措置を施すこと。
[重篤なアレルギーを起こす恐れがある為]
- ・バルーンの膨張容量は、推奨最大容量を超えないこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]
- ・血管内でカテーテルを移動させる時は、バルーンを収縮させてからゆっくりと行うこと。血管内でのカテーテルの操作は慎重に行い、操作中に少しでも抵抗を感じた場合は、操作を中断し、過度な力を加えずにバルーンを収縮させた状態でカテーテルの前進/引き抜きを行うこと。[バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為]
- ・バルーンカテーテルを用いた血管閉塞手技に伴うリスクとして、バルーンの破裂の可能性を考慮すること。
[バルーンカテーテルの不具合として頻繁に報告されている為]
- ・粘性・粒子性の高い造影剤をバルーン膨張用として使用しないこと。[インフレーション・ルーメンを閉塞させる恐れがある為]

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 [器具の清潔さ、無菌性を保証することができず、二次汚染、感染、または患者の死亡につながることがあります]
- ・再滅菌禁止 [本品は、単回使用を目的として設計されており、器具の性能を確保できない為]
- ・空気やガスでバルーンを膨張させないこと。[空気塞栓の恐れがある為]
- ・本品を体内埋め込み用には使用しないこと。[設計外使用である為]
- ・本品を血管拡張術や内膜剥離術には使用しないこと。[設計外使用である為]
- ・血管壁が石灰化している患者。[石灰化病変部位にバルーンが接触した場合、バルーンの破裂の可能性がある為]
- ・胸部上行大動脈のような高い圧力がバルーンに加わる部位での使用 [バルーンの破裂の可能性がある為]

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル オクリューションカテーテル 標準型
販売名：レメイ アオルティック・オクルージョン・カテーテル
医療機器承認番号：22900BZX00062000

レメイ・バスキュラー合同会社
〒102-0082
東京都千代田区一番町16-1
共同ビル一番町1F

Tel. 03-5215-5681
Fax. 03-5215-5682
<https://lemaitre-japan.co.jp/>

米国本社URL
<https://www.lemaitre.com/>



LeMaitre and Your Peripheral Vision are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc. or one of its affiliates.
©2021 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. M00007 RevB 10/14, JP Lev2 07/21