



XenoSure リンス(洗浄)の手順

準備するもの

- ・ 1,000mlの滅菌生理食塩水が入る容器
- ・ 無菌の非外傷性鉗子
- ・ 滅菌生理食塩水 3,000ml (1,000mlを3回分)

1.

無菌の非外傷性鉗子を使用してパッチを包装容器から取り出します。

2.

リンスに使用する容器を1,000mlの滅菌生理食塩水で満たします。パッチを滅菌生理食塩水中で **4分間**すすぎます。(1回目)

3.

滅菌生理食塩水を取り換えます。

6.

リンスに使用する容器を1,000mlの滅菌生理食塩水で満たします。パッチを滅菌生理食塩水中で **4分間**すすぎます。(3回目)

5.

滅菌生理食塩水を取り換えます。

4.

リンスに使用する容器を1,000mlの滅菌生理食塩水で満たします。パッチを滅菌生理食塩水中で **4分間**すすぎます。(2回目)

7.

リンス後に使用するまでは、乾燥を防ぐためパッチは滅菌生理食塩水に浸しておきます。

使用前に必ず製品の
リンス(洗浄)を行ってください。

4分×3回で合計12分です。



レメイト・バスキュラー合同会社
東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町1F
TEL:03-5215-5681 FAX:03-5215-5682

※ご使用前には必ず添付文書をご確認ください