



















# LeMaitre® 血栓除去カテーテル

## ORDERING INFORMATION







バルーン直径	バルーン容量	カテーテル径	色	長さ	ガイドワイヤー推奨サイズ	製品番号	JANコード
オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル 標準的なガイドワイヤーサイズとの互換性があります。ストップコックとシリンジが含まれます。							
6 mm	0.20 mL	3F		40 cm	.018"	1651-34	4571191910912
6 mm	0.20 mL	3F		80 cm	.018"	1651-38	4571191910929
10 mm	0.75 mL	4F		40 cm	.025"	1651-44	4571191910936
10 mm	0.75 mL	4F		80 cm	.025"	1651-48	4571191910943
12 mm	1.50 mL	5F <i>Plus</i>		40 cm	.035"	1651-84	4571191911018
12 mm	1.50 mL	5F <i>Plus</i>		80 cm	.035"	1651-88	4571191911025
13 mm	1.60 mL	6F		40 cm	.035"	1651-64	4571191910974
13 mm	1.60 mL	6F		80 cm	.035"	1651-68	4571191910981
14 mm	1.75 mL	7F		80 cm	.038"	1651-78	4571191911001

### シングル・ルーメン血栓除去カテーテル

4.5 mm	0.05 mL	2F		40 cm		1601-24	4571191912015
4.5 mm	0.05 mL	2F		60 cm		1601-26	4571191912022
8.0 mm	0.20 mL	3F		40 cm		1601-34	4571191912046
8.0 mm	0.20 mL	3F		80 cm		1601-38	4571191912053
10.5 mm	0.75 mL	4F		40 cm		1601-44	4571191912060
10.5 mm	0.75 mL	4F		80 cm		1601-48	4571191912077
13.0 mm	1.50 mL	5F		80 cm		1601-58	4571191912091
13.5 mm	1.60 mL	6F		80 cm		1601-68	4571191912114
14.0 mm	1.75 mL	7F		80 cm		1601-78*	4571191912138

\* 印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。

### ノバジル・ラテックス・フリー・シングル・ルーメン・血栓除去カテーテル

4 mm	0.05 mL	2F		60 cm		1801-26	4571191910608
6 mm	0.20 mL	3F		40 cm		1801-34	4571191910615
6 mm	0.20 mL	3F		80 cm		1801-38	4571191910622
9 mm	0.60 mL	4F		40 cm		1801-44	4571191910639
9 mm	0.60 mL	4F		80 cm		1801-48	4571191910646
11 mm	1.00 mL	5F		80 cm		1801-58	4571191910660
13 mm	1.60 mL	6F		80 cm		1801-68	4571191910684
14 mm	1.75 mL	7F		80 cm		1801-78	4571191910707

この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしに変わることがございます。詳細は担当営業にご確認ください

#### 【警告】

適用対象(患者)

・本品は天然ゴムを使用している。(ノバジル・ラテックス・フリーを除く)

天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがある。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。〔重篤なアレルギーを起こす恐れがある為〕

使用方法

・空気やガスでバルーンを膨張させないこと。〔空気塞栓の恐れがある為〕

・バルーンの膨張容量は、推奨最大容量を超えないこと。〔バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為〕

・血管内でのカテーテルの操作は慎重に行い、操作中に抵抗を感じた場合は、操作を中断し、過度な力を加えずにバルーンを収縮させた状態でカテーテルの前進／引き抜きを行うこと。〔バルーンの破裂、カテーテルの破損、血管損傷の恐れがある為〕

#### 【禁忌・禁止】

使用方法

・再使用禁止、再滅菌禁止



LeMaitre and Your Peripheral Vision are registered trademarks and NovaSil is a trademark of LeMaitre Vascular, Inc.  
©2021 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA. M0005 Rev. M 04/14 JP Rev.4 07/21

# LeMaitre® 血栓除去カテーテル

シングルルーメン

オーバーザワイヤー

ノバジル・ラテックス・フリー・シングル・ルーメン

#### LeMaitre Vascular, Inc.

63 Second Avenue  
Burlington, MA 01803  
USA

T 781 221 2266

F 781 221 2223

#### LeMaitre Vascular ULC

9135 Keele Street, Suite B6  
Vaughan, ON L4K 0J4  
Canada

T 905 832 8077

F 905 303 3903

#### LeMaitre Vascular GmbH

Otto-Volger-Str. 5a/b  
65843 Sulzbach/Ts.  
Germany

T +49 (0)6196 659230

F +49 (0)6196 527072

#### LeMaitre Vascular, Pte. Ltd.

138 Robinson Road  
#12-02 Oxley Tower  
068906  
Singapore

T +65 6813 0281

#### レメイト・バスキュラー合同会社

〒102-0082  
東京都千代田区一番町16-1  
共同ビル一番町1F

Tel. 03-5215-5681

Fax.03-5215-5682

<https://lemaitre-japan.co.jp/>

米国本社URL

<https://www.lemaitre.com/>



# LeMaitre®

## 血栓除去カテーテル

### 用途に応じた各種血栓除去カテーテル:

レメイト・バスキュラーは高品質な各種血栓除去カテーテルを提供します。

シングル・ルーメン、オーバーザワイヤー、  
ノバジル・ラテックス・フリーの3タイプをご用意しています。

放射線不透過  
透視下でカテーテルの位置が容易に確認できます。

柔軟性  
操作性に優れ、目的部位への導入がスムーズです。

滅菌期間  
ノバジル・ラテックス・フリーは5年間、  
シングル・ルーメンは6年間、オーバーザワイヤーは6年間の  
滅菌期間があります。

### オーバーザワイヤー

#### 操作性

目的の部位に導入しやすいようにガイドワイヤーの挿入が可能です。標準的なガイドワイヤーとの互換性があります。

#### 造影剤注入機能

塞栓/血栓の画像を見易くし、透視下での操作を容易にするための造影剤注入が可能です。

#### 灌流機能

灌流により、カテーテルの通過抵抗を少なくし、抜去時の内膜損傷を最小限にします。

### シングル・ルーメン

#### 安定性

バルーンは耐破裂性に優れています。

#### 同心性

バルーンは均等に中心から拡張していきます。

#### 膨張性

バルーンは注入量に応じ膨らんでいきます。

### ノバジル・ラテックス・フリー

レメイト・バスキュラーは NovaSil® ラテックス・フリーカテーテルも取り揃えています。  
この製品群は高品質のシリコンバルーンを用い、ラテックスに対し敏感な患者様にラテックス・フリーの選択肢を提供します。

### オーバーザワイヤー

特定保険医療材料機能区分  
血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き ダブルルーメン  
販売名： オーバー ザ ワイヤー血栓除去カテーテル  
医療機器承認番号：21900BZY00046000

### シングル・ルーメン

特定保険医療材料機能区分  
2F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型  
3F-7F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型  
販売名： 血栓除去カテーテル  
医療機器承認番号：16000BZY00913000

### ノバジル・ラテックス・フリー

特定保険医療材料機能区分  
2F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型  
3F-7F: 血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型  
販売名： ノバジル血栓除去カテーテル  
医療機器承認番号：21600BZY00302000